

Changement des filtres DIASAFE PLUS sur le générateur FRESENIUS 5008 HF

CHRA Réanimation	Classeur de protocoles	7900- version N°1	
		2/07/2009	Page 1/1

Rédaction : IDE S. MARMILLOUD	Vérification ASDET N. GERLIER	Approbation : Dr DOREZ D.
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------

1 BUT

Cette procédure a pour but d'expliquer le changement des deux filtres diasafe plus.

2 DOMAINE D'APPLICATION

Service de réanimation, pour les infirmier(e)s et aide soignante technique.

3 DEFINITIONS

La machine affiche le jour de changement des filtres (100 jours d'utilisation ou 3 mois de DLU). Au moins 3 jours avant le changement à réaliser.

4 REALISATION DU CHANGEMENT DES FILTRES

Menu « Rinçage désinfection »

Choisir « changer les 2 filtres » la machine prépare le changement

« Confirmer » la machine vidange les filtres

Une fois les filtres vidangés, le message apparaît.

Enlever les bouchons des filtres et insérer les nouveaux, puis confirmer.

La machine purge les filtres.

Lancer une désinfection thermo chimique.

5 MOTS CLES

- Filtre diasafe - 5008
- Diasafe

Diffusion pour application	Service de réanimation
----------------------------	------------------------

Rédaction	S. MARMILLOUD (IDE)	
Vérification	N. GERLIER (IDE)	
Approbation	Dr D. DOREZ	

Historique des créations et modifications successives du document			
Version	date	nature des modifications	page
1	2/07/2009	1 ^{ère} version	1